




Style Dr.CHAIR Heat
取扱説明書

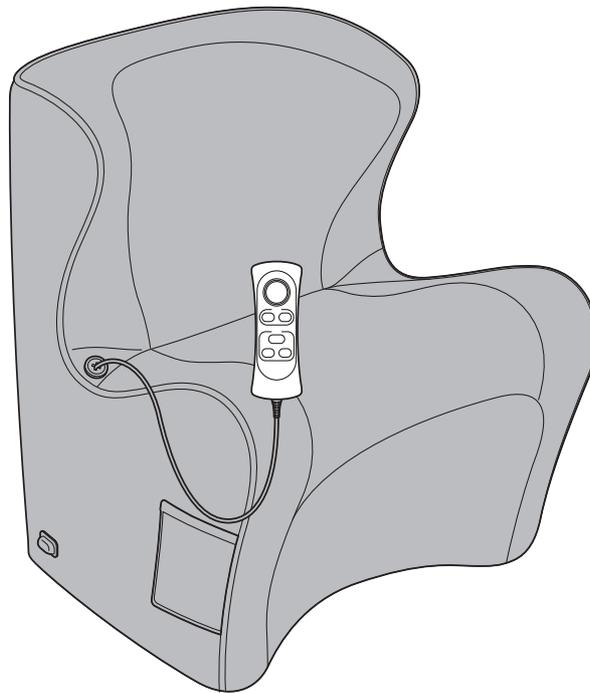

株式会社MTG

〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG 第2HIKARIビル <https://www.mtg.gr.jp>

[お客様相談室]

MTG 製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 **0120-315-332**

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

MTG
We have many dreams

目次

安全上のご注意	2
各部の名称・付属品	5
設置・接続と座りかた	6
ヒーターの使いかた	8
お手入れ方法	10
保管方法	11
廃棄方法	11
Q&A	11
故障かな?と思ったら	12
製品仕様	12
保証・アフターサービス	13
無償修理規定	14
保証書	裏表紙

【免責事項について】

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

安全上のご注意

- 事故のおそれがありますので子供には使用させないでください。
(ただし、保護者、医師または専門家の監督下で使用する場合はその限りではありません。)
また、本品の上に乗らせたり、遊ばせたりしないでください。
- 次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。
 - 悪性腫瘍のある方
 - 心臓に障害のある方
 - 温度感覚喪失が認められる方
 - 腰や背中に異常のある方
 - 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
 - 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある方
 - 体温38℃以上(有熱期)の方
例1. 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期
例2. 衰弱している場合
 - 安静を必要とする方
 - 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の方
 - 低温やけどをしたことのある方
 - 高血圧の人
 - 不整脈のある方
 - 睡眠時無呼吸症の方
 - ぜん(喘)息の方

上記に当てはまらない場合でも、身体に異常を感じている方、医療機関で治療中の方、その他ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 不安定な場所では使用しないでください。ケガや破損のおそれがあります。
- 本品の上にとったり、踏み台にしたり、背もたれに腰かけたりしないでください。
ケガや破損のおそれがあります。特に小さなお子様には十分ご注意ください。
- 小さなお子様を一人で本品へ近付けさせないでください。本品が倒れ、ケガをするおそれがあります。
- 分解、改造、修理はしないでください。事故やケガのおそれがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
- 浴室などの湿度の高い所では使用しないでください。
- 一人用の機器のため、複数の人が同時に使用しないでください。
- 付属のACアダプターは本品専用です。他の製品には使用しないでください。
また、付属の専用ACアダプター以外のACアダプターも本品には使用しないでください。
- 専用ACアダプターやコントローラーのコードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。コードを傷め、感電や故障、火災のおそれがあります。
- 端子部分が一度曲がったり、コネクタ部分に変形してしまった専用ACアダプターは使用しないでください。
- 水回りでは専用ACアダプターを使用しないでください。感電のおそれがあります。
- 濡れた手で専用ACアダプターの抜き差しはしないでください。感電ややけどのおそれがあります。

- 電源はたこ足配線にしないでください。
- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。
- コントローラーや本体に水やお茶などの液体をかけないようご注意ください。
- コード類や本体、コントローラーをピンや針金などの金属類で傷つけないでください。
- 床材やたたみ、じゅうたんなどの材質によっては、傷がついたり色が移ったりするおそれがあります。マットやカーペットを敷いた上で本品を使用するなど注意してご使用ください。
- 移動するときは必ず専用ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いた後、本品を持ち上げて運んでください。引きずると床に傷がついたり、本品が破損したりするおそれがあります。本品は大きいため、持ち運びの際は落とさないよう十分にご注意ください。
- コントローラーを落としたり踏みつけたりしないでください。
- ペットおよび動物には使用しないでください。コード類や本体への噛み付き・ひっかきや尿をかける等により、故障の原因となるおそれがあります。
- 睡眠薬等を服用した人や、めいてい(酩酊)状態の人、身体の自由が利かない人や乳幼児は使用しないでください。
- 低温やけどのおそれがありますので、ヒーターを「温度[高]」に設定して長時間使用しないでください。また、必ず衣服を着用してご使用ください。
- 1時間に一度程度、軽く身体を動かすよう、ご注意ください。
- 比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ箇所に触れていると低温やけどをおこすことがありますので、設定温度や使用時間を調整するなど取り扱いにご注意ください。
- 本品を暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。溶けて変形するおそれがあります。

使用前のご注意

- 専用ACアダプターは根本までしっかり差し込んでください。
- 専用ACアダプターのほこりなどは、乾いた布で拭くなどして定期的に清掃してください。
- 専用ACアダプターのプラグやコネクター部分を接続する際は、接続の方向を確認してから、まっすぐ挿入してください。
- 専用ACアダプターのプラグやコネクター部分に液体や異物が付着しないようにしてください。
- 専用ACアダプターが損傷、断線、破損しているときは使用せず、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室に修理を依頼してください。
- ボタンが正常に作動することを確認してください。
- 他の製品・美容機器などとは併用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良をおこしたりするおそれがあります。
- 本品には付属の専用ACアダプター以外のACアダプターを使用しないでください。
- ガタやゆるみがあるコンセントには接続しないでください。

使用中のご注意

- 転倒、破損のおそれがありますので、次のような座り方をしないでください。
 - 勢いをつけて立つ／座る
 - 後ろに体重をかけすぎる

- 本品のひじ掛け部に寄りかかる
- 足が床に着かない状態で座る
- 背もたれと座面を逆に置いて座る
- 浅く座る
- 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止し、専用ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 次のような場合は、コンセントから専用ACアダプターを抜いてください。事故や感電、発火などのおそれがあります。
 - 水や異物が本体や専用ACアダプターに入ったり、かかったりした場合
 - 雷が鳴り出した場合
 - 停電になった場合
 - 専用ACアダプターのコードが損傷または断線した場合
 - 長期間使用しない場合
- 使用中に誤って設定変更されないよう、コントローラーは操作時以外はコントローラーポケットに収納してください。
- 機器に故障や異常に熱くなる等を発見した場合は、使用を直ちに中止し、電源を切ってください。
- 機器が動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のため、すぐに専用ACアダプターの電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、または(株)MTG お客様相談室に必ず点検・修理をご依頼ください。
- 機器に水やお茶などの液体をこぼした場合は使用せず、お買い上げの販売店、または(株)MTG お客様相談室に点検をご依頼ください。
- お尻のポケットに物を入れたり、腰回りにアクセサリなどをつけたりしたまま使用しないでください。突起物などにより生地が傷ついたり、裂けたりするおそれがあります。
- 本品は摩擦により、他の物に色移りしたり、シミができたりするおそれがあります。特に衣服などが濡れているときは、色移りしやすいので、使用しないでください。
- コントローラーを布で包んだりして使用しないでください。
- コントローラーや本体に重いものを載せたり、物を落とさないでください。
- 犬や猫などペット類のそばで使用しないでください。
- 本体やコントローラーを傷つける、破損させる、落下させる、またこれらに重いものを載せるなど、乱暴な取り扱いをしないでください。
- ヒーター使用中に、コントローラーを座面の上に置いて使用しないでください。
- 本品の電源が入っているときに、座面の上に物を放置しないでください。
- 分解、改造、修理はしないでください。事故やケガのおそれがあります。


使用後のご注意

- 電源(入/切) ボタンを押して電源を切ったあと、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 長時間ご使用にならないときやお手入れの際には、必ず専用ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 専用ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを持って引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力を加えないでください。

各部の名称・付属品


本品は座り姿勢をサポートする商品です。
また、ヒーターにより腰とおしりを温める機能も備えています。

本体

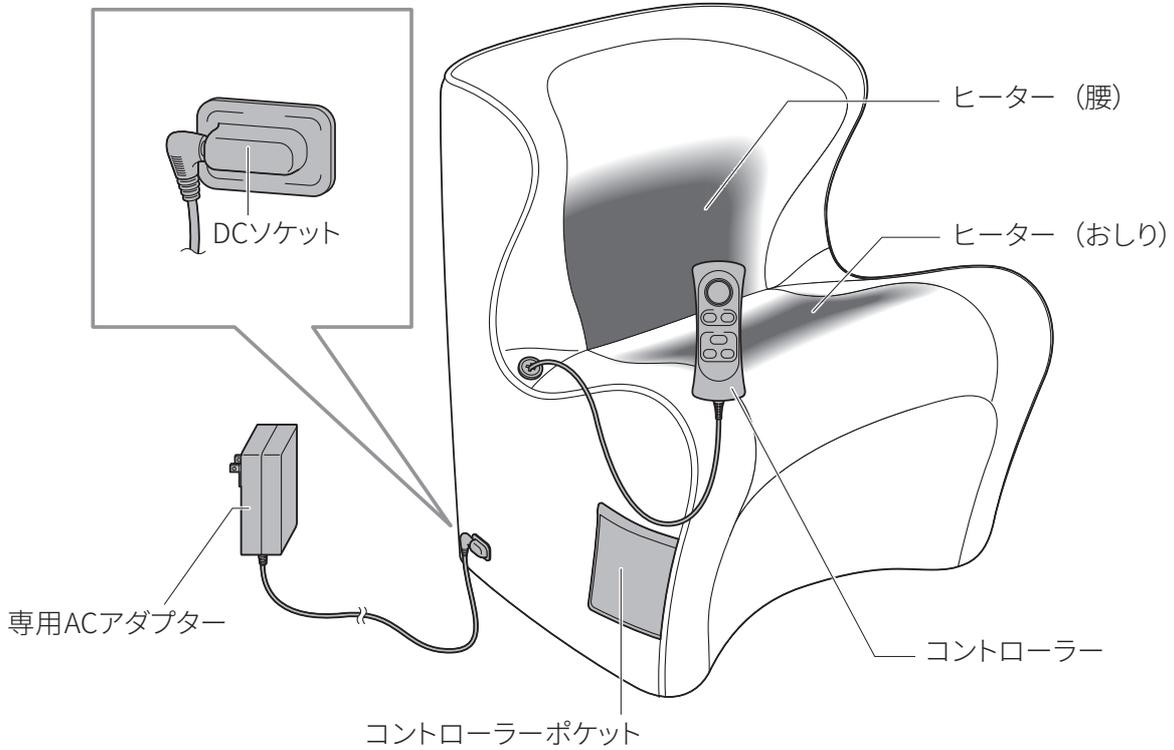

- 本体から生地が若干浮いている部分がありますが異常ではありません。浮いた生地の上から内側にあるヒーター部分を手で触らないでください。

コントローラー

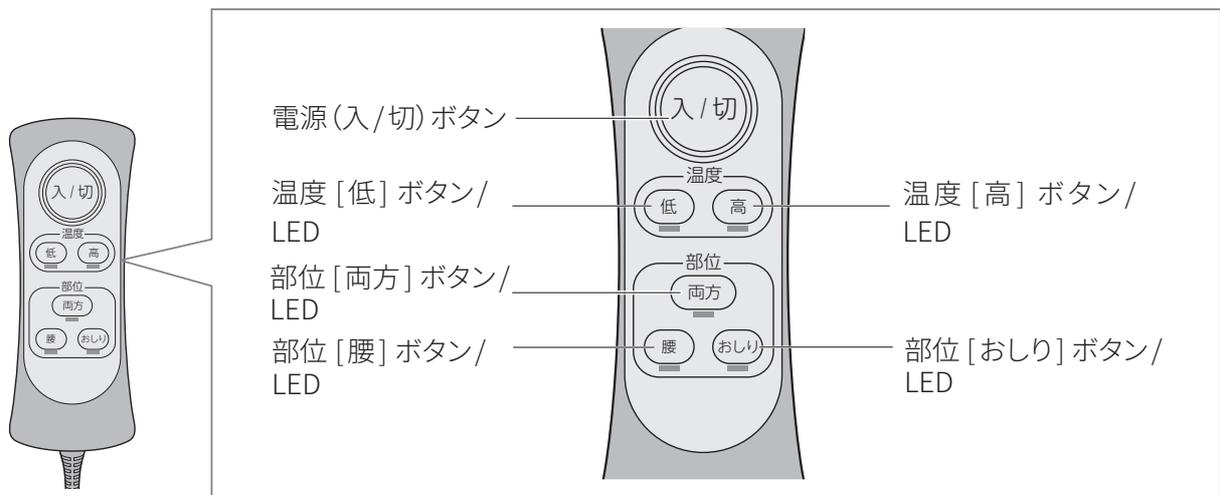

付属品

専用ACアダプター.....1本

取扱説明書(保証書付き)(本書).....1冊


設置・接続と座りかた

持ち運びかた


本品を持ち上げ、床から離して運んでください。
落とさないようご注意ください。

設置場所について

- 火気の近くや高温環境（ホットカーペットの上、こたつなど）では使用しないでください。また、加熱したなべや湯沸ししたやかんなど、熱いものを直接置かないでください。変色、変形のおそれがあります。
- 床を傷つけないよう、じゅうたんやカーペットの上に設置してください。

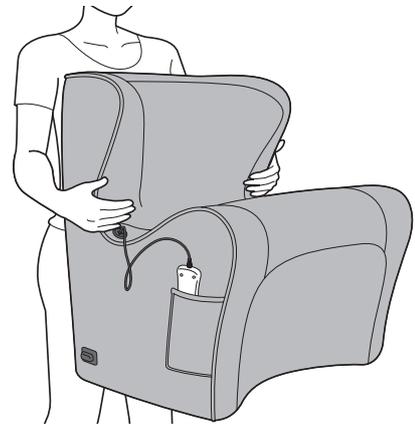


1. 専用ACアダプターで本品と電源コンセントを接続する

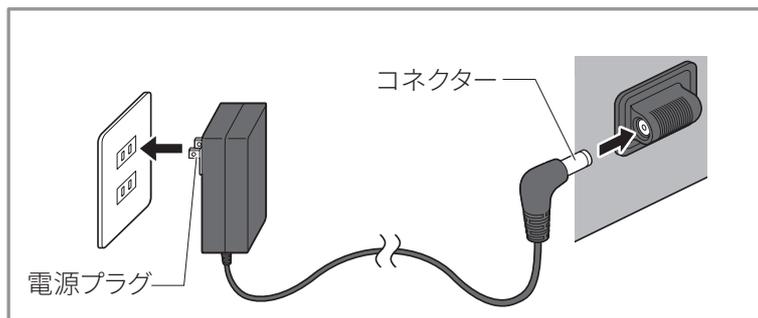

2. 本体に座る



- コントローラーを使用しないときは、コントローラーポケットに収納してください。

背中からお尻が本品のラインに沿うように深く腰かけてください。

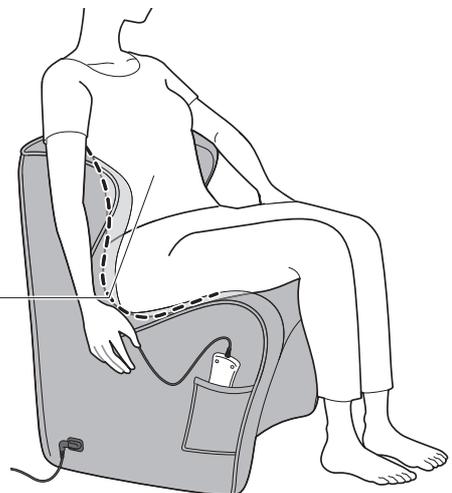

立ち上がりかた

図のように両手を支えにして、立ち上がります。

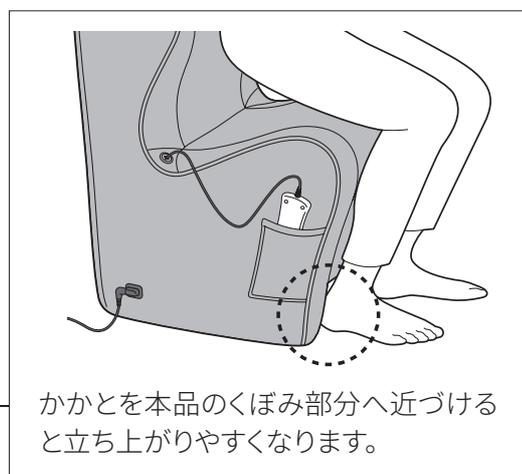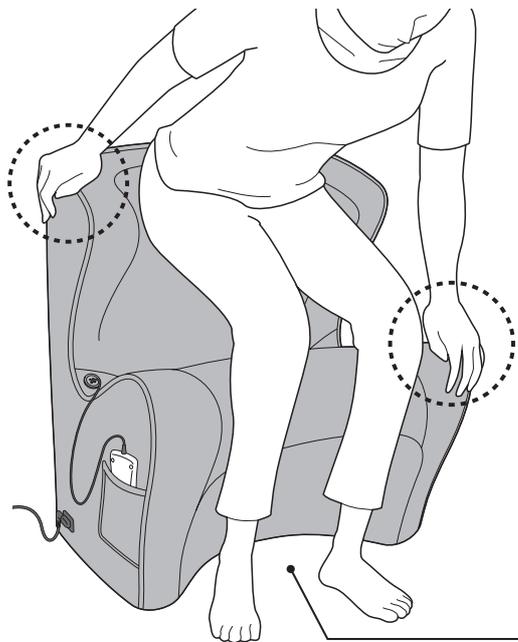


- 専用ACアダプターやコントローラーのコードに足を引っかけて転倒しないようご注意ください。



ヒーターの使いかた

本品は腰と座面それぞれに独立したヒーターを内蔵しています。


本品では、温める部位を2か所、ヒーターの温度を2段階から選ぶことができます。

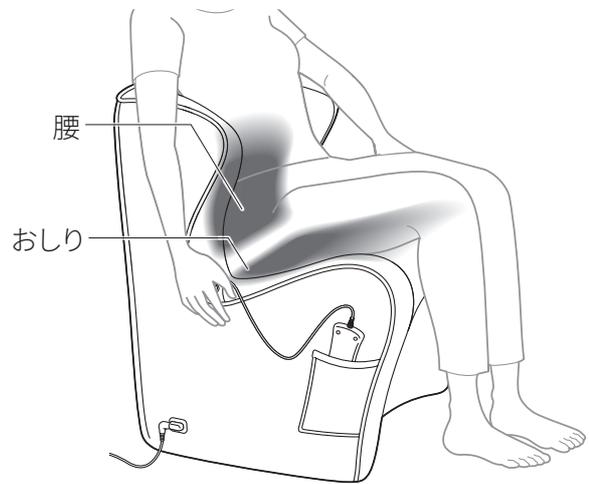

- 低温やけどのおそれがありますので、ヒーターを「温度[高]」に設定して長時間使用しないでください。また、必ず衣服を着用してご使用ください。
- 比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ箇所に触れていると低温やけどをおこすことがありますので、設定温度や使用時間を調整するなど取り扱いにご注意ください。

1. 電源(入/切)ボタンを押す

- 本体から「ピッ」という音が鳴ります(電源ON時)。
- ヒーターがオンになった部位と、現在設定されている温度のLEDが点灯します。
- 電源が「入」時の初期設定では、部位「両方」、温度設定[低]に設定されています。


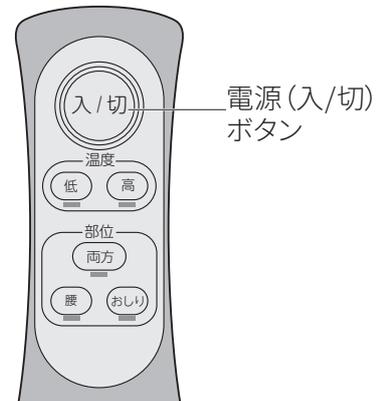


2. 温める部位を変更したい場合は、温めたい部位のボタン(「腰」「おしり」「両方」)を押す



- 選択した部位のLEDが点灯し、その部位のヒーターがオンになります。
- ボタンを押すと「ピッ」という確認音が鳴ります。





「両方」：腰部と座面部両方

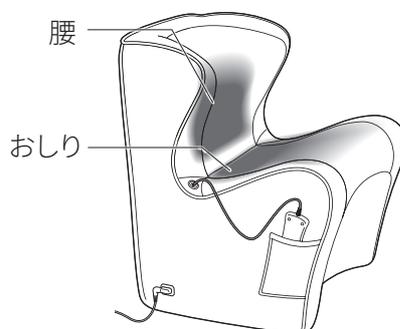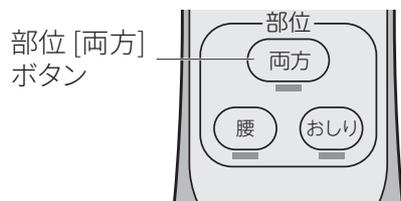

「腰」：腰部のみ

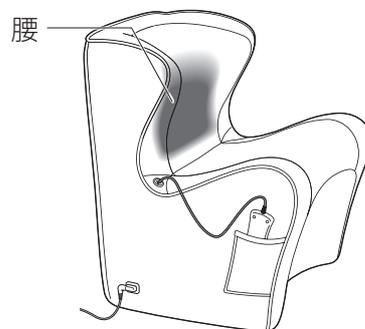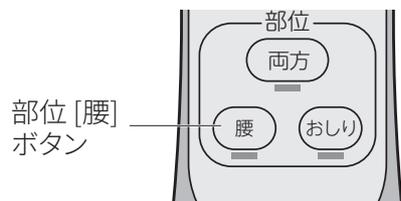


「おしり」：座面部のみ

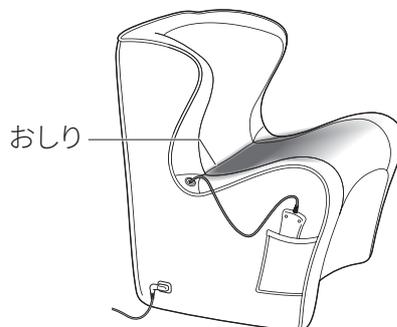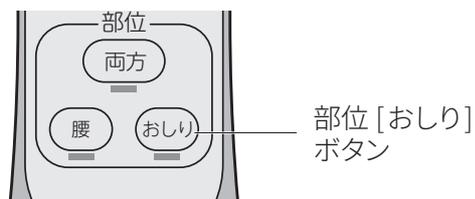


3. ヒーターの温度を変更したい場合は、温度 [低] ボタンまたは温度 [高] ボタンを押す

- 選択した温度のLEDが点灯します。

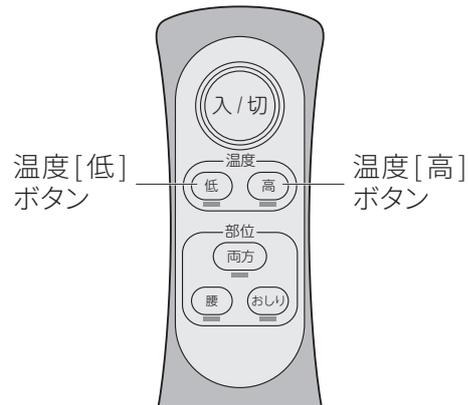

4. ヒーターをオフにしたい場合は電源 (入/切) ボタンをもう一度押す

- すべてのLEDが消灯し、ヒーターがオフになります。
- 電源を入れて60分経過すると、「ピー」という音が鳴り自動的に電源が切れます。

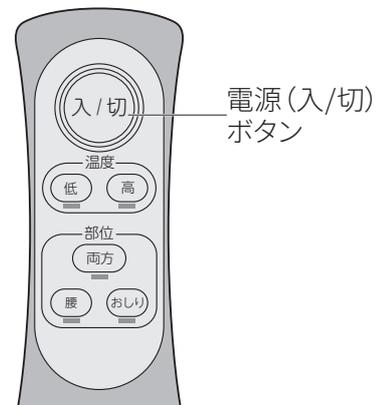

お手入れ方法

汚れた場合は、以下の方法でお手入れしてください。

- 日常のお手入れは掃除機で本体布地カバーの織り目や隙間に入ったほこりを吸い取ってください。
- それでも汚れが落ちない場合は、以下の方法でお手入れしてください。
 1. 3～5%に希釈した中性洗剤液に浸した布をよく絞り、優しく叩くように汚れを拭き取ってください。
 2. その後、水もしくはぬるま湯に浸してかたく絞った布で叩くように拭き、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

お手入れのポイント

- 本体布地カバーの取り外しはできません。
 - 消臭スプレーの使用は控えてください。
 - 汚れは長時間経過すると取れなくなる場合がありますので早めに対処してください。
 - シンナー、ベンジンなどの溶剤や化学雑巾は使用しないでください。また、強く拭くとほつれや色落ちの原因となりますので注意してください。
- コントローラーの汚れは柔らかい布で乾拭きして落としてください。汚れがひどいときは、石けん液を少し含ませた布で拭き取ってください。
 - 機器に水やお茶などの液体をこぼした場合は使用せず、お買い上げの販売店、または(株)MTG お客様相談室に点検をご依頼ください。

保管方法

- 高温・多湿の場所（浴室、車中など）を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 保管中に、本品へ物を置いたままにしないでください。
- 機器の上に熱器具を置かないでください。
- 専用ACアダプターの電源プラグとコネクタにゴミを付着させないようにしてください。
- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

廃棄方法

- 各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
- 本品に傷や亀裂が入った場合は使用を中止して廃棄してください。

Q&A

Q1 一日どの程度使用できますか？

A1 使用される方の体調に合わせてご使用ください。1日に数回繰り返しご使用になっても問題ありませんが、初めて使用される方は、短い時間からのご使用をおすすめします。また、1時間に一度程度、軽く身体を動かすよう、ご注意ください。

Q2 毎日使用してもよいですか？

A2 毎日ご使用いただけます。ただし、使用中、気分が悪くなったり、身体や肌に異常を感じたときはただちに使用を中止してください。

Q3 併用してはいけない物がありますか？

A3 美容機器などとは併用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良をおこしたりするおそれがあります。

Q4 カバーは取り外しできますか？

A4 危険ですので絶対に取り外さないでください。また商品本来の機能を果たせなくなるおそれがありますのでおやめください。

Q5 色移りすることはありますか？

A5 床材：フローリングやじゅうたんの種類によっては色移りするおそれがあります。
衣服：素材によっては色移りのおそれがあります。

故障かな？と思ったら

修理に出される前に、必ずお読みください。

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	専用ACアダプターが正しく接続されていない。	専用ACアダプターがコンセントおよびDCソケットに正しく接続されていることをご確認ください。
ヒーターが温かくなならない	電源が入っていない。	電源(入/切)ボタンを押して電源を入れ、温めたい部位を選択してください。
ヒーターの温度が低く感じる	ヒーターの設定温度が低い。	温度が低く感じる場合は、温度[高]ボタンを押してください。
60分経過していない状態でブザーが鳴り、電源が切れる	内部エラーです。	本品内部に異常が発生しています。すぐに以下を行ってください。 ①専用ACアダプターをコンセントからすぐ抜く(本品には座らないようにする) ②お買い上げの販売店、または(株)MTG お客様相談室に連絡し、点検・修理を依頼する

上記の確認をしても症状が改善されない場合や、その他異常がある場合はただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または(株)MTG お客様相談室までお問い合わせください。

製品仕様

商品名	Style Dr.CHAIR Heat (スタイルドクターチェアヒート)
品番	YE-AA
製品寸法	幅 590mm × 奥行 560mm × 高さ 640mm 座面の高さ 300mm
質量	約 4.9kg
耐荷重	約 120kg
定格 (AC アダプター) 入力 出力	入力：AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A 出力：DC 24V ≒ 2500mA コード長：約 1.8 m
消費電力	55W
オートタイマー	60分
温度設定	腰、おしり：約 39℃ (低)、約 44℃ (高)
材質	構造部材：ポリスチレン クッション材：ウレタンフォーム 張り材：ポリエステル 100% コントローラーケース：ABS 樹脂 コントローラーコード：塩化ビニル樹脂
製造元	株式会社 MTG (日本)
原産国	中国
同梱品/付属品	同梱品：本体 (1)、専用ACアダプター (1) 付属品：取扱説明書(保証書付き) (1)

- 本品の性能向上の為、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本品は時間経過や温度変化により、変色または硬度が変わる場合がありますが、使用上問題はありません。
- 商品の臭いが気になる場合は、風通しのよい所で数日間陰干ししてください。臭いは徐々に薄れていきます。
- 製造工程上、シワなどが発生することがありますが、異常ではありません。
- 本品は継続して使用することにより身体となじみ、形状が若干変化する場合がありますが使用上問題はありません。

保証・アフターサービス

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。

保証について

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになったあと、大切に保管してください。

保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

※使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室へお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中
お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。
- 保証期間(1年間)が過ぎているとき
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます(生地などの消耗品、および付属品を除く)。
 - イ) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と保証書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - ロ) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株)MTG お客様相談室にお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - ニ) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 - ホ) 保証書の提示がない場合
 - ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
 - チ) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
 - リ) 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障及び損傷
3. 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

本書はお買い上げ日から1年間、無償修理規定に基づいて無償修理をお約束するものです。取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理をいたしますので、本品と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室に修理をご依頼ください。

■販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品などの場合も含めて必ずご記入の上お客様にお渡しください。

※以下につきまして、ご記入のない場合は無効となります。

商品名	Style Dr.CHAIR Heat (スタイル ドクターチェア ヒート)
品番	YE-AA
お客様 (お名前、ご住所、電話番号)	
保証期間	お買い上げ日より1年 ※生地などの消耗品、および付属品を除く
お買い上げ日	
販売店名	

シリアルナンバーを使用して、
以下 URL で正規品かをお調べいたします。

正規品ラベル

[https://www.mtg.gr.jp/
intellectual_property/authent/](https://www.mtg.gr.jp/intellectual_property/authent/)

