


———— Styleメディカルプロ専用 ————

MOIST BLANKET

モイストブランケット

取扱説明書

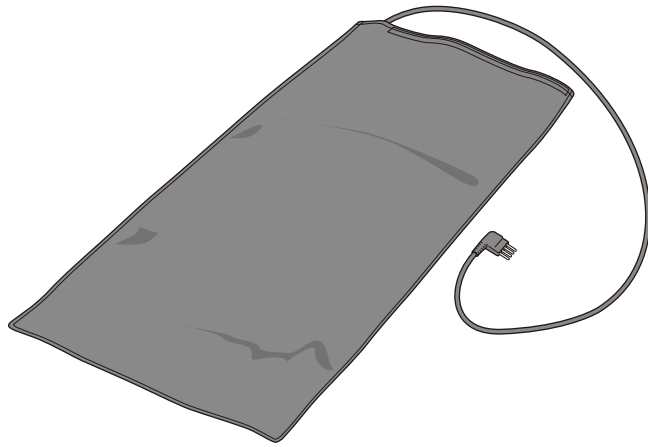

この度は、「Styleメディカルプロ専用モイストブランケット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書はお読みになられたあとも大切に保管してください。

この取扱説明書には保証書がついています。「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、よくお読みになられたあとも大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

⚠注意 誤った使い方をすると、「人が軽傷を負う可能性や、物的損害*の発生が想定される」内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

守っていただく内容を、以下の図記号で説明しています。

⊘ 禁止の行為であることを告げるものです。

❗ 行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

本品はStyleメディカルプロ専用の製品です。以下の「安全上のご注意」とともに、必ずStyleメディカルプロ(接続先の機器)の取扱説明書に記載された「安全上のご注意」の内容もよくお読みのうえ、指示に従ってご使用ください。

使用前のご注意

⚠警告



次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。

事故や体調不良をおこすおそれがあります。

- 各種皮膚炎および皮膚感染症（皮膚組織の炎症を含む）などの方
- 伝染病疾患の方
- 布製品でかぶれたことのある方
- 温度感覚喪失が認められる方
- 低温やけどをしたことのある方
- 上記以外に身体に異常を感じているとき

⚠警告



• 泥酔した方や感覚が鈍くなっている方、使用直前に風邪薬など眠気を誘う薬を服用した方は使用しないでください。けが・事故のおそれがあります。



- ご使用する際は必ずブランケット本体に専用ブランケットカバーを装着した状態でご使用ください。やけどや低温やけどの原因になります。
- ご使用前には、必ずブランケット本体および専用ブランケットカバーが破損していないことを確認してください。けが・感電のおそれがあります。

使用時のご注意

⚠警告



- 皮ふの同じ部分に当てすぎたり、身体の下に敷いて使用したり、Styleメディカルプロと身体の間挟んで使用したりしないでください。熱すぎると感じた時はすみやかに皮ふから離してください。やけどや低温やけどの原因になります。
- 専用ブランケットカバー以外のカバーを使用しないでください。感電・故障・発熱による火災の原因になります。
- 電源の入ったブランケット本体には、専用ブランケットカバーを外した状態で直接肌を触れないでください。やけどやけがの原因になります。
- 湯たんぽ、電気こたつ、電気あんか、その他の暖房器具と併用して使用しないでください。劣化・感電・故障・ショート・発火・けが・やけどのおそれがあります。

⚠注意



- 折りたたんだまま使用したり、他の用途に使用しないでください。感電・発火のおそれがあります。
- 眠りながらの使用はしないでください。けが・事故のおそれがあります。
- テレビ・ラジオ・AV機器などの電化製品に接触させて使用しないでください。誤作動や故障するおそれがあります。

使用後、保管時のご注意

⚠警告



- 本品の上に物を置いたりしないでください。事故・故障のおそれがあります。
- ブランケット本体を水洗いしないでください。感電・故障・発熱による火災の原因になります。
- 本品にピンや針などの金属や異物を入れたり、シーツなどを縫いつけたりしないでください。感電・故障・発熱による火災の原因になります。

【免責事項について】

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。


付属品

梱包箱開封時に以下の内容が入っているかを確認してください。

■専用ブランケットカバー

■ブランケット本体

- 使用面表示タグの付いた面が身体側になる向きでお使いください。
- 本品出荷時はブランケット本体に専用ブランケットカバーを被せた状態で梱包しています。
- 本品は特有のにおいがすることがありますが異常ではありません。

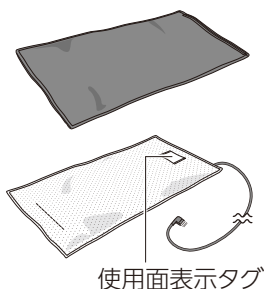

■取扱説明書

本品より放出される水分について

本品は空気中の水分を吸着し、ご使用中に放出する商品です。このため放出する水分の量に関しては、ご使用環境や保管環境の影響を大きく受けます。あまりにも湿度を感じることが出来ない場合は、乾燥した場所を避け、本品を適度に休ませてからご使用ください。


ご使用方法

①ご使用にあたって

本品は、家庭用電位治療器「Styleメディカルプロ」の専用品です。

△注意

- ・使用前にブランケットカバーから本体を取り出して向きを確認し、**必ず使用面表示タグの付いた面を身体に当ててお使いください**。逆向きで使うと低温やけどの原因になります。
- ・本品を折り置んだ状態で電源を入れしないでください。事故や故障、やけどの原因になります。
- ・本品の上に座ったり、本品を身体の下に敷いたりしないでください。事故や故障、やけどの原因になります。

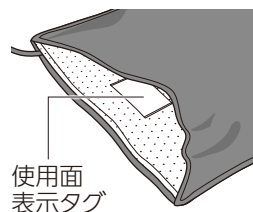


②接続プラグを差し込みます

「Styleメディカルプロ」の接続コネクタに図の向きで差し込んでください。

△警告

- ・濡れた手で接続プラグを差し込まないでください。感電やけがの原因になります。
- ・接続プラグは確実に根元まで差し込んでください。感電やけがの原因になります。

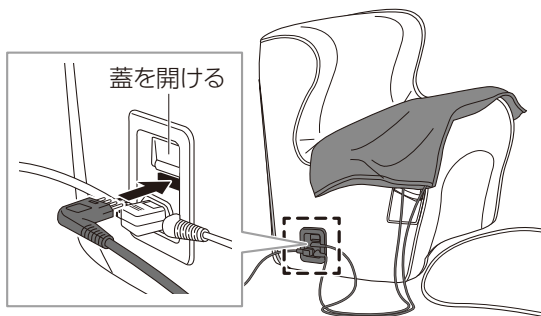

③本品を身体の温めたい部分に当てます(使用例)

肌に直接当てずに、必ず衣服の上からご使用ください。また専用ブランケットカバーも必ず装着した状態でご使用ください。また本体(マット部)に使用面表示タグが付いていますので、ご使用する際はこの面を身体側にしてください。

膝・太もも



お腹に使用することも
できます



低温やけどについて

一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度(40~60℃)のものでも長時間皮ふの同じ箇所にふれていると、(状態や個人差によって異なります)低温やけどをおこす場合があります。

④「Styleメディカルプロ」のコントローラーで加温設定を行います

加温のしかたについては、Styleメディカルプロの取扱説明書をお読みください。

- ・使い始めは、マット部に折りぐせ、わずかな臭いなどを感じるがありますが、ご使用にともない徐々に消えますので安心してお使いください。

お手入れ方法

△注意

お手入れの際は必ず接続プラグを抜いてください。また濡れた手で抜き差しをしないでください。故障・感電・やけど・事故の原因になります。

専用ブランケットカバー


- ・内側に縫い付けてある洗濯絵表示に従って洗濯してください。



- ・アイロンはあて布を使用してください。
- ・洗濯の際は洗濯ネットを使用してください。

ブランケット本体

- ・ブランケット本体は丸洗い出来ません。汚れが落ちにくい場合は石けん水を少し含ませた布で、よくしぼって表面をたたくようにふき取ってください。その後、水でひたした布をよくしぼって洗浄液をふき取り、やわらかい乾いた布でかるくふいた後、直射日光を避けて自然乾燥させてください。

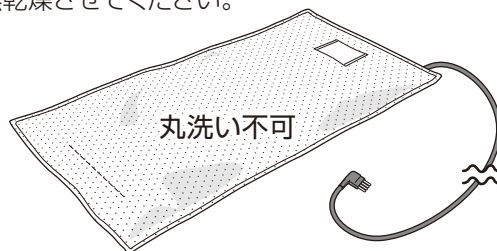

- ・ブランケット本体 (専用ブランケットカバーを被せた状態含む) に水をかけないでください。故障の原因になります。
- ・アルカリ性・酸性洗剤や、シンナー・ベンジン・アルコール等の薬剤類は絶対に使用しないでください。変色や変質、劣化のおそれがあります。
- ・**専用ブランケットカバーをこすり続けると毛玉ができることがあります。**
毛玉が気になる場合は、専用ブランケットカバーをブランケット本体から外した状態で、浮かせた毛玉の下にハサミの刃を入れて、毛玉だけを切り落としてください。このとき、生地を傷つけないように十分注意してください。

保管方法

△注意

高温・多湿・直射日光の当たる所・ほこりの多い場所に保管はしないでください。故障の原因になります。

- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・保管環境は屋外環境をさけ、必ず室内(20~25℃前後)にて保管してください。
- ・次のようなところには保管しないでください。
 - ・水のかかるところ ・風呂場などの特に湿気の多いところ ・極端に高温、低温なところ
 - ・多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響をうけるところ
 - ・傾斜、振動、衝撃のあるところ
 - ・化学薬品の保管場所や、腐食性ガス(塩素ガスや硫黄系ガスなど)の発生するところ
- ・無理にたたまないでください。
- ・ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

廃棄方法

本品を廃棄する場合は、お住まいの都道府県市町村の指導に従って処分してください。

故障かな?と思ったら

●温かにならない場合

→ Styleメディカルプロ取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をお読みください。

●それ以外の異常を感じた場合

- ・破損してしまった ・本体、接続コード、接続プラグが異常に熱い
- ・焦げくさいにおいがする など

→ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または(株) MTG お客様相談室までお問い合わせください。

半年に一回は次のようなことを点検してください。

- ・接続コードを動かすと電気が切れたり入ったりしませんか?
- ・接続コードがさわれないほど熱くなっていませんか?
- ・接続コードにキズが付いていませんか?
- ・異常なおい(焦げるような)や異常な音が出ていませんか?
- ・接続コードをさわると電気(ビリビリ)を感じることはありませんか?

※異常があれば故障や事故防止のためお買い上げの販売店、または(株) MTG お客様相談室までご連絡ください。

製品仕様

販売名	Styleメディカルプロ専用 モイストブランケット	設定温度	約38℃(弱)、約42℃(中)、 約45℃(強)
型番	<ブラック>BS-MB2246H-N <ブラウン>BS-MB2246H-B	重量	約1.5kg
寸法	約720×380×15mm (専用ブランケットカバー装着時、 コード除く)	接続コード 長さ	約1.2m
消費電力	211W(ヒーター:208W) (Styleメディカルプロ接続時)	原産国	中国

* 本品の性能向上のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

保証・アフターサービス

保証について

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間はご購入日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、ご購入の販売店、または(株)MTGお客様相談室へお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中
ご購入になってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。ご購入の販売店、または(株)MTGお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。
- 保証期間(1年間)が過ぎているとき
保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます(付属品を除く)。
 - イ) 無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - ロ) おご購入の販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や分解・改造による故障および損傷
 - ロ) おご購入後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障および損傷
 - ニ) 車両、船舶などに搭載された場合の故障および損傷
 - ホ) 本書の提示がない場合
 - ヘ) 本書におご購入年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障および損傷
 - チ) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷
 - リ) 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障および損傷
3. 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - ※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
 - ※保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社MTG

〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG第2HIKARIビル

<http://www.mtg.gr.jp>

【お客様相談室】

MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 **0120-315-332**

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

<受付時間> 9:30 ~ 17:30 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

MTG
We have many dreams

発行年月 2018/03 第1版
BSMB1J01IM01W