

Style BX Kids

取扱説明書



このたびは、「スタイルビーエックスキッズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本品は身につけることにより、姿勢をサポートする商品です。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書はお読みになったあとも、大切に保管してください。

保護者の方へ

必ず初めに保護者の方がお読みいただき、
お子様が安全にお使い頂けるよう
お伝えください。

使用上のご注意

保護者の方へ

- 低学年のお子様ที่ใช้使用される場合は、正しく装着できていることを確認してください。
- お子様が「使用上のご注意」を守って使用できない可能性がある場合は、保護者の方の監督下でご使用ください。


本品について

- 本品は姿勢のサポートを目的としており、上体や背骨を治療するものではありません。本来の用途目的以外では使用しないでください。
- アレルギー体質や病気、傷、ケガなど、お子様のご使用に不安がある場合は医師に相談してください。
- 初めて使用するときはベルトを締めすぎないようにし、短い時間(15分程度)から様子を見ながら使用してください。特にかぶれ、かゆみの出やすい方はご注意ください。
- 就寝時は使用しないでください。
- 運動時、および危険を伴う作業時は使用しないでください。
- 装着したまま遊具に入ったり、狭い場所をくぐったりしないでください。
- 本品をのばして遊ばないでください。
- 本品を加工、改造、修理しないでください。また、本品が破損している状態で使用しないでください。

装着するとき

- 指定部位以外には使用しないでください。首に巻きつけると窒息のおそれがあります。
- 必ず、サイズのあったものを使用してください。サイズが合わない場合は、無理に使用しないでください。
- きつく締め付けすぎないようにしてください。体に跡がのこったり、うっ血したりするおそれがあります。
- 必ず、袖のある肌着や衣類の上から装着してください。ただし、メッシュ地のような生地肌着は不快感を感じる場合がありますのでご注意ください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 面ファスナーが肌に直接触れないように注意してください。
- 装着中に腕を上げたり下げたりすることで痛みを感じた場合は、使用を中止してください。
- 長時間の装着により痛みを感じた場合は、使用を中止してください。
- 装着中にズレたり、ねじれたりしたときは、必ず手順どおりに正しく装着しなおしてください。
- 他の類似製品などと併用しないでください。また、本品を二重にして使用しないでください。
- 他の衣類や椅子などとこすれると色移る場合があります。

各部のなまえ

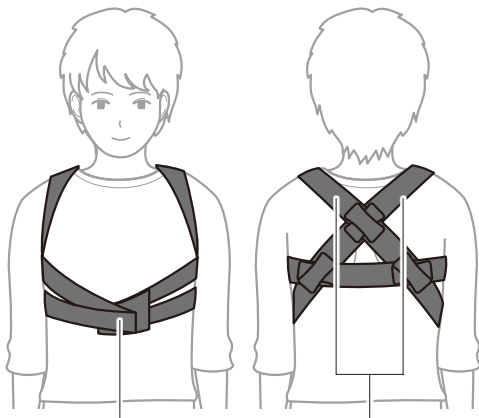

こていベルト

かたベルト
(輪っか)

お手入れのしかた

汚れなどが付着したり、よれたりした場合は以下の方法で洗濯してください。そのまま使用し続けると、劣化を早めるおそれがあります。






1. 中性洗剤で手洗い(押し洗い)する。
2. 洗濯後は、絞らずにタオル等で軽く水気を取り、陰干しする。

洗濯するときの注意

- 塩素系漂白剤、酸性洗剤、柔軟剤などは使用しないでください。
- 必ず面ファスナーをとめた状態で洗濯してください。
- 洗濯機やタンブラー乾燥機、アイロンは使用しないでください。
- 製品の特質上、色落ちする場合があります。他のものと一緒に洗濯しないでください。
- 長時間濡れたままにしておくと、色が落ちたり、形状が崩れるおそれがあります。洗濯後は、形を整えてすぐに干してください。



装着（そうちゃく）のしかた

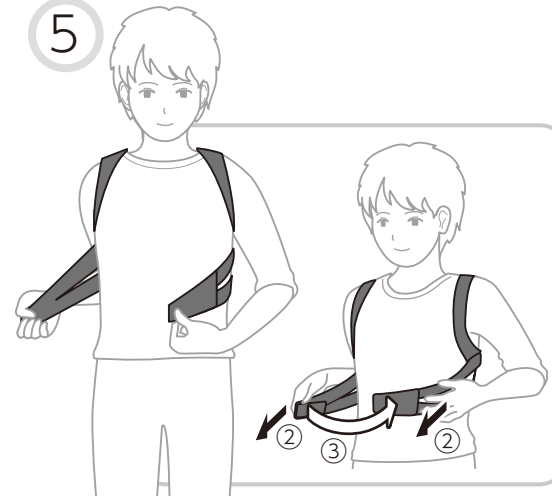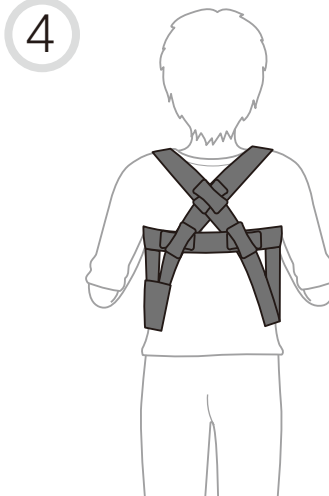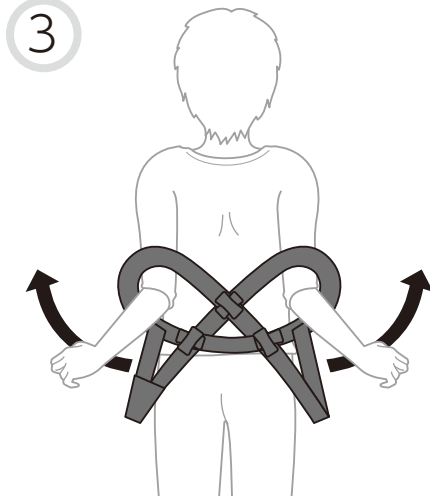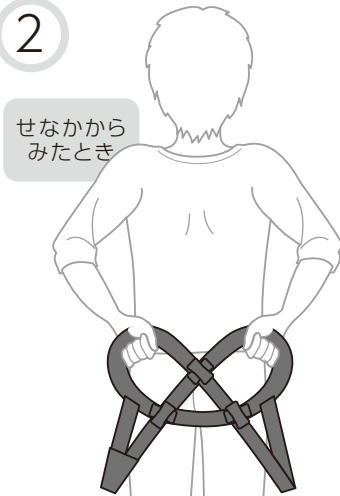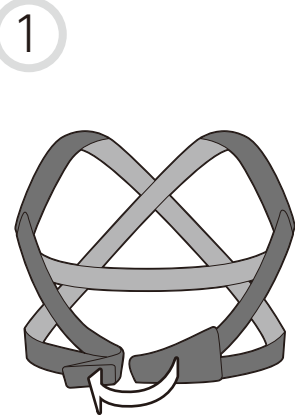

こていベルトをはがす。スタイルビーエックスキッズをおしりの近くへもっていき、かたベルトの左と右をにぎる。ベルトのギザギザがわをおしりにあてましょう。



- ベルトにツメを引っかけない。（デリケートな生地を使用しているため、ツメが割れたり、本品が破損するおそれがあります。）
- なるまでは、こていベルトをきつくしない。 • 使う前にサイズがっているか確認する。

手をそのまま輪っかにとおして、かたベルトをひじまで上げる。





かたベルトをかたまでかける。

- リュックのように両手をいっしょに動かすと、うまくできます。
- ねじれていたら、なおしましょう。

①左右のこていベルトを両手で持つ。
②少し下向きで、前へ軽くひっぱる。
③右手のこていベルトを左手がわにはりつける。

- おなかとむねのあいだぐらいではりましょう。
- はったら、はがれないように2、3回おさえましょう。
- こていベルトが上にズレてきたら、はりなおしましょう。
- なれてきたらベルトをはるばしょをかえて、きつさを変えてみましょう。

かんたんにつけかた

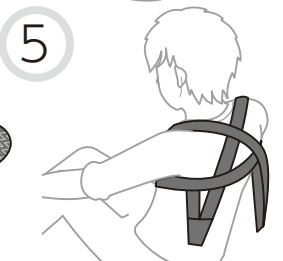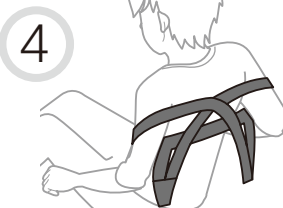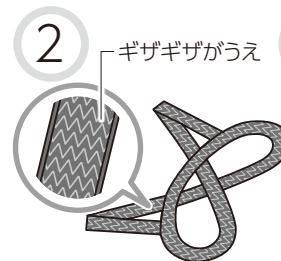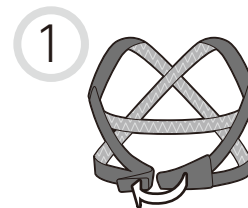

保管のしかた

火気のそばや高温多湿な場所、直射日光を避けて保管してください。直射日光に当てると色褪せなどの原因になります。

保管するときの注意

- ・小学生未満のお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- ・長期保管時は、折りたたんだまま重いものをのせないでください。へたりやシワの原因になります。

製品仕様

商品名	Style BX Kids (スタイルビーエックスキッズ)
品番	SSサイズ：YS-AE03SS Sサイズ：YS-AE03S
サイズ	SSサイズ：身長120～135cm/ 胸囲60～66cm Sサイズ：身長135～150cm/ 胸囲66～74cm (身長と胸囲のサイズが異なる場合は、胸囲でサイズを選んでください)
材質	本体：ナイロン54%、ポリエステル42%、ポリウレタン4% パーツ(背中)：合成皮革

本品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

株式会社MTG

〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG第2HIKARIビル

<https://www.mtg.gr.jp>

[お客様相談室] MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 **0120-315-332**

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

<受付時間> 9:30～17:30 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●ご相談窓口における個人情報の取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

MTG
We have many dreams