

Style BX Loop

取扱説明書



このたびは、「スタイルビーエックスループ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本品は身につけることにより、座り姿勢をサポートする商品です。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書はお読みになったあとも、大切に保管してください。

使用上のご注意


本品について

- 本品は座り姿勢のサポートを目的としており、背骨や腰を治療するものではありません。本来の用途目的以外では使用しないでください。
- 次のような方は使用しないでください。
 - 腰部ヘルニアや坐骨神経痛など腰や背中に疾患のある方
 - 骨が弱い方(骨折しやすい方)
 - ひざ周辺に痛みや不安のある方
 - アレルギー体質の方
 - 動脈瘤を指摘されたことがある方
 - 血行障害を起こしたことがある方
 - 装着部位に傷やケガがある方
 - 紫斑になりやすい方
 - 妊娠中または妊娠の可能性がある方
 - 成長期のお子様
- 初めて使用するときは、短い時間(15分程度)から様子を見ながら使用してください。特にかぶれ、かゆみの出やすい方はご注意ください。
- 就寝時は使用しないでください。
- 運転時には使用しないでください。
- 本品を加工、改造、修理しないでください。また、本品が破損している状態で使用しないでください。

装着するとき

- 指定部位以外には使用しないでください。
- 必ず、サイズのあったものを使用してください。サイズがあわない場合は、無理に使用しないでください。
- 素肌に直接装着しないでください。ただし、メッシュ地のような生地の肌着の上に装着する場合は不快感を感じる場合がありますのでご注意ください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 長時間の装着により痛みを感じた場合は、使用を中止してください。
- 装着中にズレたり、ねじれたりしたときは、必ず手順どおりに正しく装着しなおしてください。
- 他の類似製品などと併用しないでください。
- 雨天、水場、水気の多い場所では使用しないでください。
- パンツのポケットに物を入れたままで使用しないでください。
- 他の衣類や椅子などこすれると色が移る場合があります。
- 使用後、衣類にしわがつく場合があります。
- 長時間の同じ座り姿勢は、静脈血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)の発症リスクを高めます。1時間に一度は本品を外し、身体を軽く動かしてください。

各部のなまえ

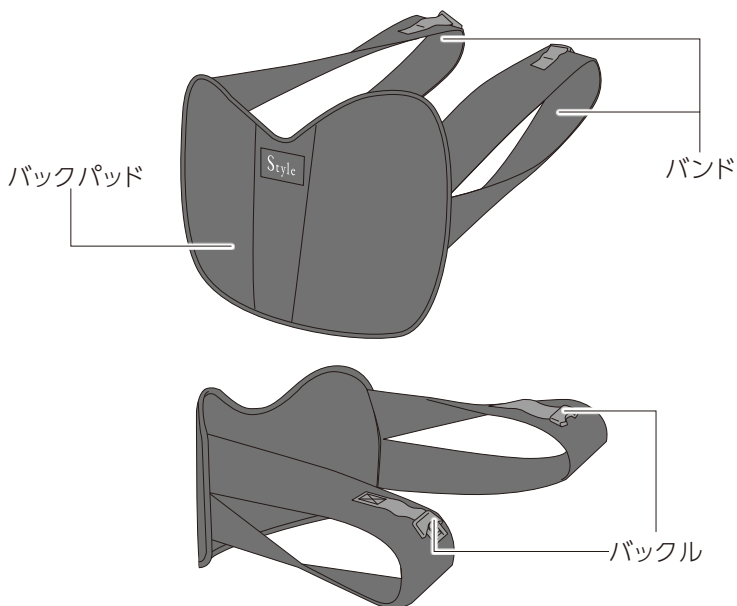

お手入れのしかた

汚れなどが付着したり、よれたりした場合は以下の方法で洗濯してください。
そのまま使用し続けると、劣化を早めるおそれがあります。

1. 中性洗剤で手洗い(押し洗い)する。
2. 洗濯後は、絞らずにタオル等で軽く水気を取り、陰干しする。

洗濯するときの注意

- 塩素系漂白剤、酸性洗剤、柔軟剤などは使用しないでください。
- 必ず面ファスナーをとめた状態で洗濯してください。
- 洗濯機やタンブラー乾燥機、アイロンは使用しないでください。
- 製品の特質上、色落ちする場合があります。
他のものと一緒に洗濯しないでください。
- 長時間濡れたままにしておくと、色が落ちたり、形状が崩れるおそれがあります。
洗濯後は、形を整えてすぐに干してください。





装着のしかた

1

バックパッドを背中側の腰(骨盤)のあたりに当てる。



- 本品には表裏、上下があります。バックパッドのロゴを外側に向け、正しい向きで装着してください。

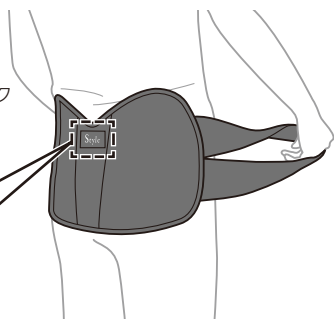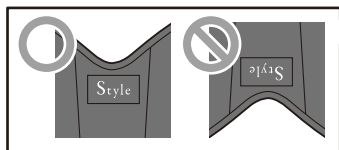

2


椅子に座り、バックルを留める。

- バンドのねじれがあれば直してください。

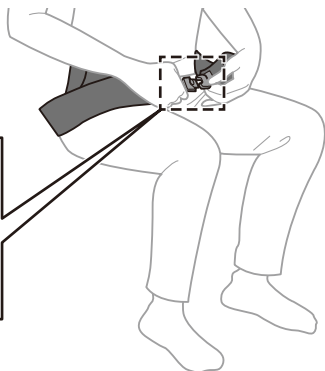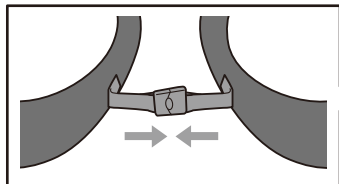

3

左右両方のバンドの輪に手を入れる。

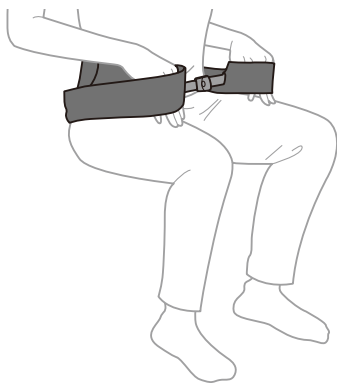

4

軽く身体を前へ倒し、手の甲側でバンドを押すように伸ばして、バンドを両脚の膝関節より下側へ引っかける。


- 膝関節にバンドを引っ掛けないでください。脚のしびれ等の原因になります。
- 片脚ずつ引っかけるとバックパッドがずれやすいため、なるべく両脚同時に引っかけてください。



取り外しかた



1

片手でバックル部分を押さえながら、バンドを片脚ずつゆっくり外す。

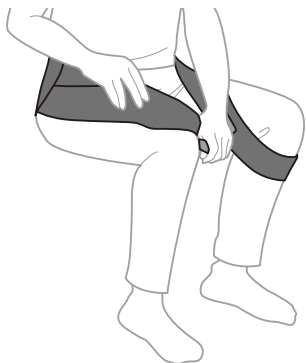

2

バックルを外す。

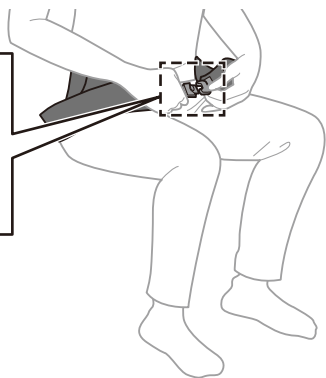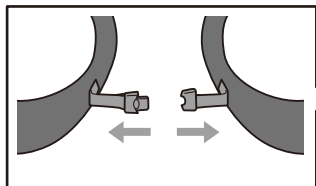

保管のしかた

火気のそばや高温多湿な場所、直射日光を避けて保管してください。直射日光に当てると色褪せなどの原因になります。

保管するときの注意

- 小さなお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- 長期保管時は、折りたたんだまま重いものをのせないでください。へたりやシワの原因になります。

製品仕様

商品名	Style BX Loop(スタイルビーエックスループ)
品番	Mサイズ : YS-AG03M Lサイズ : YS-AG03L
サイズ (身長)	Mサイズ : 146 ~ 166cm Lサイズ : 162 ~ 182cm
材質	本体 : ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、合成樹脂、天然ゴム パーツ : POM樹脂
生産国	中国

本品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


株式会社MTG

〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG第2HIKARIビル

<https://www.mtg.gr.jp>

[お客様相談室]

MTG製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 **0120-315-332**

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

<受付時間> 9:30 ~ 17:30 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

MTG
We have many dreams