

Style

スタイル ランバー デラックス 取扱説明書


使用目的： 本品は、腰まわりを安定させる腰用サポートベルトです。また、指圧パーツを取り付けて指圧代用器としてもご使用いただけます（医療機器ではありません）。

※指圧代用器の効用は、指圧パーツを取り付けていないときは得られません。
必ず、肌着や衣類の上から装着してください。


指圧代用器の効用

(1) 血行をよくする。 (2) 筋肉の疲れをとる。 (3) 筋肉のこりをほくす。



本体 (表側)

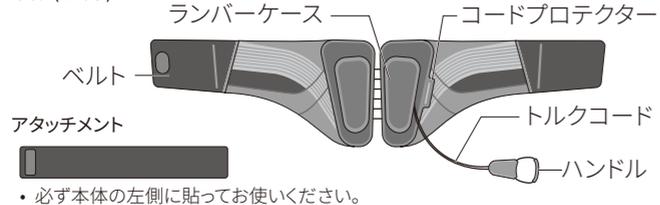

本体 (裏側)

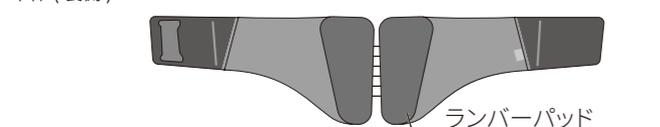

指圧パーツ

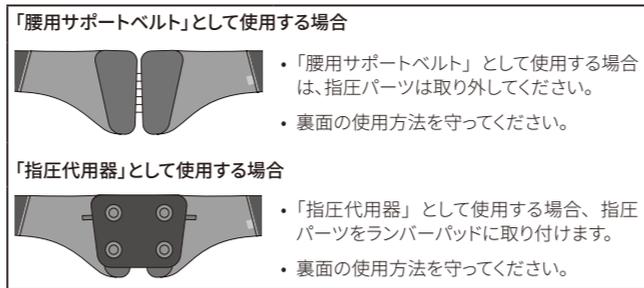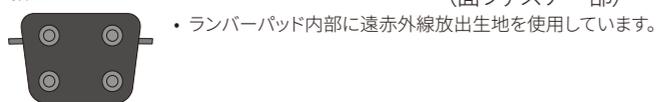

⚠ 安全上のご注意

- 次のような方は使用しないでください。
 - 腰部ヘルニアや坐骨神経痛など腰や背中に疾患のある方
 - アレルギー体質の方
 - 動脈瘤を指摘されたことがある方
 - 血行障害を起こしたことがある方
 - 装着部位に傷やケガがある方
 - 装着部位に知覚障害のある方
 - 妊娠中または妊娠の可能性のある方
 - 成長期のお子様

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 初めて使用するときはベルト本体やトルクコードを締めすぎないようにし、短い時間（15分程度）から様子を見ながら使用してください。特にかぶれ、かゆみの出やすい方はご注意ください。

- 就寝時は使用しないでください。
- 本品装着時の激しい運動はお控えください。転倒により腰を強打すると、ケガのおそれがあります。

- 本品を装着して、駆動部や回転部がある機器（自転車やマッサージチェアなど）を使用しないでください。トルクコードが巻き込まれ、ケガのおそれがあります。

- 本品を分解、加工、改造、修理しないでください。
- 本品が破損している状態で使用しないでください。

- 腰まわり以外には使用しないでください。
- ベルト本体やトルクコードをきつく締め付けすぎないようにしてください。

- 面ファスナーが肌に直接触れないように注意してください。

- 本品を装着して椅子などに座ると、姿勢の変化により締め付けが強くなる場合があります。その場合は、ハンドルでトルクコードの締め付けを調整してください。

- 着け心地が悪い場合など、違和感がある場合はただちに使用を中止してください。
- 背もたれが固い椅子に背部のランバーケースを押し当てて長時間もたれかからないでください。

- 長時間使用するときは、圧迫による皮ふや血行の障害を防ぐため、適宜本品を装着し直してください。また、痛みを感じた場合は、使用を中止してください。

- 屋外で使用しないでください。
- 指圧パーツを背骨、肩甲骨、腰周辺の骨、脇腹に当てないでください。

- 指圧パーツで腰以外の場所を刺激しないでください。

- 指圧パーツを取り付けて使用するときは、万一身体に異常を感じた場合に、使用者本人が速やかに本品を取り外せる状態で使用してください。

- 指圧パーツを取り付けて装着するときは、床などに寝転がらないでください。

- 指圧パーツをベルト本体に取り付けずに使用しないでください。

⚠ 使用上のご注意

- 装着時、面ファスナーが衣類に貼り付かないようご注意ください。
- ハンドルは、面ファスナーでベルト本体にしっかり貼り付けてください。

- 濡れたり、他の衣類や椅子などこすれたりすると色が移る場合があります。

- 火気のそばや高温多湿な場所、直射日光を避けて保管してください。

- 小さなお子様やペットの手の届かないところに保管してください。

- 指圧パーツを使用しないときは、つまずいてケガをしないよう、床に放置せず安全な場所で保管してください。

- 指圧パーツを保管する際は、面ファスナーが意図せず布製品に貼り付かないようご注意ください。

- 廃棄時は各自自治体が指定している廃棄方法に従ってください。

- トルクコードが切れたり滑車部が破損するなど、本品が破損している場合は使用を中止し、廃棄してください。

お手入れする

ベルト本体のお手入れ

ベルト本体は、ランバーケースを取り外して手洗いでできます。
※お手入れの際、指圧パーツは取り外してください。

- 洗濯機は使用できません。

- 中性洗剤以外の洗剤や除菌・消臭スプレー、衣類・布製品用消臭剤を使用しないでください。シミになるおそれがあります。


- シンナー、ベンジン、アルコールなどでは拭かないでください。変形や変色の原因になります。

- ドライヤーやファンヒーターなどの温風を直接当てないでください。変形や破損の原因になります。

- 他のものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや、面ファスナーが貼り付いて生地を傷める場合があります。

- アタッチメントも同様に洗濯できます。

1 ランバーケースを取り外す。

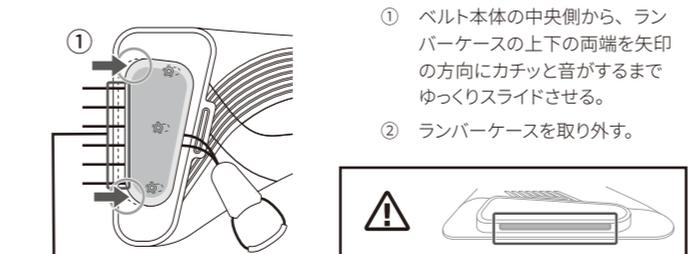


2 ベルト本体を洗う。

- 中性洗剤で手洗い(押し洗い)し、洗濯後は絞らずにタオルなどで軽く水気をとり、陰干ししてください。



3 ランバーケースを取り付ける。

- ベルトが乾いたことを確認し、ランバーケースを取り付けてください。

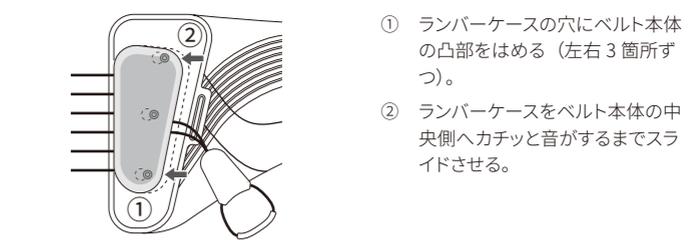

指圧パーツ/ランバーケースのお手入れ

指圧パーツおよびランバーケースが汚れた場合は、以下の方法でお手入れしてください。

- 指圧パーツおよびランバーケースは丸洗いでできません。洗濯機や乾燥機、スチーマーは使用しないでください。

- 汚れは長時間経過すると取れなくなる場合がありますので、早めにお手入れしてください。

- 水で濡らして固く絞ったタオルなどの布で、優しく叩くように汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

- 汚れが落ちない場合は、以下の方法でお手入れしてください。

- 3～5%に希釈した中性洗剤液に浸した布をよく絞り、優しく叩くように汚れを拭き取ってください。

- その後、水もしくはぬるま湯に浸して固く絞った布で叩くように拭き、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

| | |
|------------------|---|
| 商品名 | Style Lumbar Deluxe (スタイルランバー デラックス) |
| 品番 | YS-BF |
| サイズ (cm、ウエスト) | 60～110 (アタッチメント装着時) |
| 材質 | ベルト本体：ポリエステル、ナイロン、その他 樹脂ケース：ABS樹脂+ポリカーボネート 指圧パーツ：エラストマー |
| 同梱品/付属品 | 本体 (1)、指圧パーツ (1)、アタッチメント (1)、付属品:取扱説明書 (1) |
| 製造元 | 株式会社 MTG (日本) |
| 原産国 | 中国 |



◀ Web でも取扱説明書をご覧ください。



◀ Style ブランドの様々なプロダクト


株式会社 MTG
〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番 MTG 第2HIKARIビル
<https://www.mtg.gr.jp>

0120-315-332

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

「腰用サポートベルト」として使用する

指圧パーツを取り外した状態で、腰用サポートベルトとしてご使用いただけます。
※指圧代用器の効用は、指圧パーツを取り付けていないときは得られません。

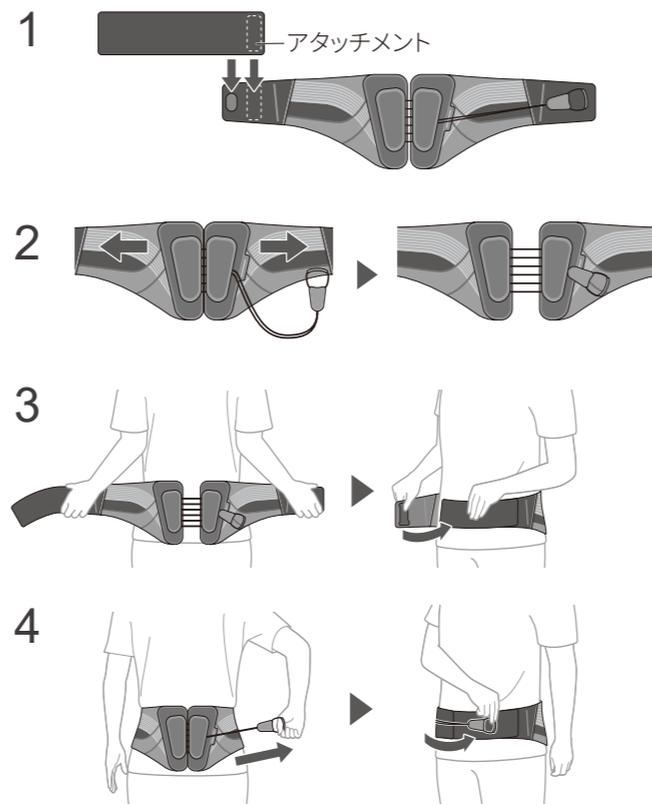


ご使用の目安：

使いはじめは、ベルト本体やトルクコードを締めすぎないようにし、短い時間(15分程度)からお試ください。

- 1 ベルト本体の左端にアタッチメントを取り付ける。
・ハンドルがベルト本体に貼り付いている場合は、事前にベルト本体から剥がしておいてください。
- 2 ベルト本体を左右に引っ張り、左右のランバーケースを離す。
・トルクコードがいちばん短くなるまで離してください。
- 3 図の向きでベルト本体を腰に軽く巻いて面ファスナーで留める。
・腰骨がベルト本体の上下の中央にくる位置を装着位置の目安として巻いてください。
・ランバーケースを内側(身体に当たる側)にして装着しないでください。
- 4 腰まわりの締め付けが心地よいと感じる程度に、ハンドルをゆっくり引っ張る。
・ハンドルは、面ファスナーでベルト本体に貼り付けてください。
・装着後に装着位置のずれや締め付けの緩みを感じたら、装着し直したり、ハンドルでトルクコードの締め付けを調整したりしてください。

「指圧代用器」として使用する

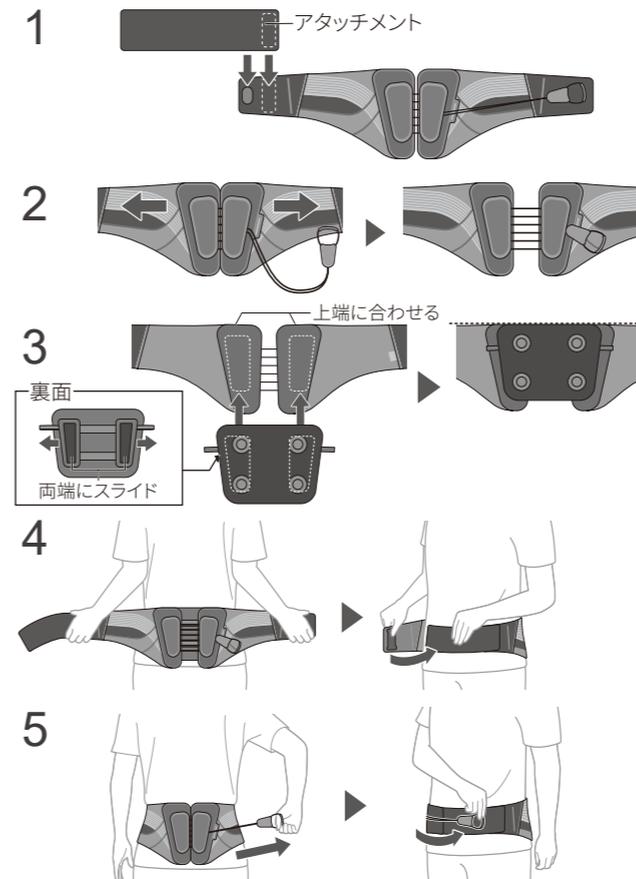


ご使用の目安：

1日1回15分以内を目安に使用してください。

- 1 ベルト本体の左端にアタッチメントを取り付ける。
・ハンドルがベルト本体に貼り付いている場合は、事前にベルト本体から剥がしておいてください。
- 2 ベルト本体を左右に引っ張り、左右のランバーケースを離す。
・トルクコードがいちばん短くなるまで離してください。
- 3 ランバーパッドが表になるようにベルト本体を置き、ランバーパッドに指圧パーツを面ファスナーで貼り付ける。
・ランバーパッドに貼り付ける前に、指圧パーツの左右の面ファスナーを両端にスライドさせてください。
・ランバーパッドの上端に合わせて指圧パーツを貼り付けてください。
- 4 図の向きでベルト本体を腰に軽く巻いて面ファスナーで留め、指圧パーツが腰に当たる位置を調整する。
・腰骨がベルト本体の上下の中央にくる位置を装着位置の目安として巻いてください。
・指圧パーツを内側(身体に当たる側)に向けて装着してください。
・指圧パーツの突起部が背骨に当たらない位置に調整してください。
- 5 腰まわりの締め付け、指圧パーツの当たりが心地よいと感じる程度に、ハンドルをゆっくり引っ張る。
・ハンドルは、面ファスナーでベルト本体に貼り付けてください。
・装着後に装着位置のずれや締め付けの緩みを感じたら、装着し直したり、ハンドルでトルクコードの締め付けを調整したりしてください。

- ・使用后、腰に指圧パーツで押された感覚が数十分ほど残ることがあります。
- ・使用後は、指圧パーツを取り外して保管してください。

指圧パーツ取り外し時

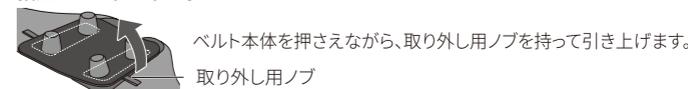

ベルト本体を押さえながら、取り外し用ノブを持って引き上げます。
取り外し用ノブ